



Wondprotocol

HEKA 

DECIFERA 

cureamedical
Innovation with Care

Omdat elke wond totale aandacht verdient

Algemene aandachtspunten bij wondbehandeling:

Stem wondbehandeling altijd af in overleg met een behandelend arts!

1. Bepaal de oorzaak van de wond en het doel van de wondbehandeling en leg dit vast in het patiëntendossier
2. Beoordeel de wond bijvoorbeeld middels het TIME-model
3. Indien er sprake is van een infectie, neem dan contact op met de behandelend arts
4. Neem algemene infectiepreventieve maatregelen in acht (bijvoorbeeld handhygiëne)
5. Het gekozen product moet contact maken met de wondbodem
6. Evalueer de voortgang van de wondgenezing ten minste wekelijks en leg dit vast in het patiëntendossier
7. Indien de wondgenezing stagneert of achteruit gaat, meld dit dan aan de behandelaar
8. Preventie, o.a. voeding, medicatie, beweging en roken spelen een rol bij de wondgenezing. Geef hierover voorlichting

TIME-model

T = Tissue | Beoordeling volgens WCS model
(weefsel vitaal/niet vitaal aanwezig in de wond)

Doel: verwijderen van niet vitaal weefsel

Uitleg: Aanwezigheid van dood weefsel belemmert de wondgenezing en verhoogt de kans op een wondinfectie

NB: Droge necrose, indien er sprake is van een infectie of arterieel vaatlijden, is verwijderen niet altijd wenselijk. Stem af met behandelaar!

I = Infection

(wel of geen infectie aanwezig)

Doel: Bacteriële balans in wond verkrijgen

M = Moisture

(vochtigheid van de wond, mate van exsudaat)

Doel: Creëren van een optimaal vochtig wondmilieu

E = Edge











(wondranden intact of verweekt)

Doel: Beschermen






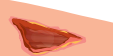



Uitleg: Epithelialisatie vindt plaats vanuit de wondranden

Voor oncologische- en brandwonden gelden andere richtlijnen en is het toepassen van TIME-model niet vanzelfsprekend

Oppervlakkige wonden

	M 	T 	T 	T 	I 	E 
	Necrotische wond Debrideren	Gele wond Reinigen	Granulerende wond Beschermen	Epithelialiserende wond Beschermen	Geïnfecteerde wond Bacteriële balans creëren	Wondranden Beschermen
DROOG	 hydrogel + zelfklevend siliconen schuimverband (*b) extra thin	zelfklevend siliconen schuimverband (*b) extra thin	zelfklevend siliconen schuimverband (*b) extra thin	siliconen wondcontactlaag + transparante wondfolie	zelfklevend siliconen schuimverband (*b) extra thin	
VOCHTIG	 alginaat + schuimverband + fixatie	alginaat + schuimverband + fixatie	zelfklevend siliconen schuimverband (*b)		niet verklevende wondcontactlaag + absorberend verband + fixatie	<p>Tip 1 Zorg dat wond- exsudaat goed kan worden opgenomen zodat wondranden niet verweken</p> <p>Tip 2 Hanteer juiste afmetingen</p> <p>Tip 3 Pas aantal verband- wisselingen aan op hoeveelheid wondexsudaat en verzadiging van het verband</p>
	 + alginaat + absorberend verband + fixatie	-----of----- alginaat + absorberend verband + fixatie	-----of----- siliconen wondcontactlaag + absorberend verband + fixatie			
NAT	 superabsorberend verband (met actieve koolstof) + fixatie	superabsorberend verband + fixatie	superabsorberend verband + fixatie		superabsorberend verband met actieve koolstof + fixatie	

Diepe wonden

	M 	T 	T 	T 	I 	E 
	Necrotische wond Debrideren	Gele wond Reinigen	Granulerende wond Beschermen	Epithelialiserende wond Beschermen	Geïnfecteerde wond Bacteriële balans creëren	Wondranden Beschermen
DROOG	 hydrogel + zelfklevend siliconen schuimverband (*b) extra thin	zelfklevend siliconen schuimverband (*b) extra thin	hydrogel + zelfklevend siliconen schuimverband (*b) extra thin	siliconen wondcontactlaag + transparante wondfolie	zelfklevend siliconen schuimverband (*b) extra thin	<p>Tip 1 Let op ondermijning van de wondranden</p> <p>Tip 2 Zorg dat wond-exsudaat goed kan worden opgenomen zodat wondranden niet verweken</p> <p>Tip 3 Hanteer juiste afmetingen</p> <p>Tip 4 Pas aantal verband-wisselingen aan op hoeveelheid wondexsudaat en verzadiging van het verband</p>
VOCHTIG	 alginaat + schuimverband + fixatie -----of----- alginaat + absorberend verband + fixatie	alginaat + schuimverband + fixatie -----of----- alginaat + absorberend verband + fixatie	hydrofiber + schuimverband + fixatie -----of----- hydrofiber + absorberend verband + fixatie		niet verklevende wondcontactlaag + absorberend verband + fixatie	
NAT	 alginaat + superabsorberend verband (met actieve koolstof) + fixatie	alginaat + superabsorberend verband (met actieve koolstof) + fixatie	alginaat + superabsorberend verband + fixatie		zilveralginaat + superabsorberend verband + fixatie	

Wondverzorging assortiment



Hydrogel

Creëert een vochtig wondmilieu en bevordert autolytisch debridement in wonden met (droog) necrotisch weefsel en/of geel beslag.

	REF nr	inhoud	stuks per verpakking	Z-Index
Decifera Hydrogel				
Steriel	SW0041	15 gram	5	16397630



Siliconen wondcontactlaag

Voorkomt verkleving aan het wondbed. Het heeft een zachte, poreuze structuur waardoor wondexsudaat optimaal wordt opgenomen in het secundaire wondverband.

	REF nr	afmeting	stuks per verpakking	Z-Index
Decifera Silicone Sheet				
Steriel	SW0100	5 x 7,5 cm	5	16397827
	SW0101	7,5 x 10 cm	5	16397851
	SW0103	12 x 15 cm	5	16397886
Adaptic Touch				
Steriel	TCH504	20 x 32 cm	5	16181646



Niet verklevende wondcontactlaag

Zalfkompres geïmpregneerd met witte paraffine. De Heka Pres is gemaakt van 100% katoen en de Heka Syntec is synthetisch. Het zalfkompres voorkomt dat de wond uitdroogt.

	REF nr	afmeting	stuks per verpakking	Z-Index
Heka Pres				
Steriel	KO0810	10 x 10 cm	10	15736644
Heka Syntec				
Steriel	KO0907	7,5 x 7,5 cm	10	15813606
	KO0920	7,5 x 20 cm	10	15813592



Schuimverband

Het draagt bij aan een vochtig wondmilieu en door de poreuze structuur kan het verband optimaal wondexsudaat opnemen. Voor de behandeling van matig tot sterk exsuderende wonden.

	REF nr	afmeting	stuks per verpakking	Z-Index
Decifera Foam				
Steriel	SW0060	10 x 10 cm	5	16397657
Tielle Non Adhesive				
Steriel	TLN1717	17,5 x 17,5 cm	5	16180674
	TLN2122	21 x 22 cm	5	16180682



Zelfklevend siliconen schuimverband

De siliconen wondcontactlaag voorkomt verkleving van het verband aan het wondbed. Dit verband is geschikt voor licht tot matig exsuderende wonden en draagt bij aan een vochtig wondmilieu.



Het verband met border is geschikt voor moeilijk te fixeren wondgebieden.

	REF nr	afmeting	stuks per verpakking	Z-Index
Decifera Foam Silicone				
Steriel	SW0071	7,5 x 7,5 cm	5	16397746
	SW0072	10 x 10 cm	5	16397762
Decifera Foam Silicone Border				
Steriel	SW0130	7,5 x 7,5 cm	5	16397665
	SW0131	10 x 10 cm	5	16397673
	SW0073	12,5 x 12,5 cm	5	16397711
	SW0080	18 x 18 cm sacrum	5	17018544
Decifera Foam Silicone Border Extra Thin				
Steriel	SW0025	5 x 5 cm	5	16933168
	SW0026	7,5 x 7,5 cm	5	16933176
	SW0027	10 x 10 cm	5	16933184
Kerrafoam Simple Non-Border				
Steriel	CWL1207	15 x 15 cm	10	16798015
	CWL1209	20 x 20 cm	10	16798023



Absorberend verband

Absorberend verband gemaakt van 100% katoen. Te gebruiken bij sterk exsuderende wonden. De blauwe vochtwerende non-woven achterzijde voorkomt doorlekken.

	REF nr	afmeting	stuks per verpakking	Z-Index
Heka Sorb				
Steriel	AB0100	10 x 10 cm	50	14061848
	AB0101	10 x 20 cm	30	14061899
	AB0102	20 x 20 cm	10	14061902
	AB0103	20 x 30 cm	10	14061910
	AB0104	20 x 40 cm	10	14061929
Niet steriel	AB0110	10 x 10 cm	50	15562166
	AB0111	10 x 20 cm	50	15446603
	AB0112	20 x 20 cm	25	15446611
	AB0113	20 x 30 cm	25	15446638
	AB0114	20 x 40 cm	12	15656969



Superabsorberend wondverband

Het bevordert de wondreiniging. Zelfs bij sterk exsuderende en geïnfecteerde wonden. Hoog absorptievermogen en is zacht voor de wondranden vanwege huid- en wondvriendelijk materiaal.

	REF nr	afmeting	stuks per verpakking	Z-Index
Curea P1 SuperCore Wondverband				
Steriel	P1-075075-10	7,5 x 7,5 cm	10	15641007
	P1-100100-10	10 x 10 cm	10	15641031
	P1-100200-10	10 x 20 cm	10	15641074
	P1-100300-10	10 x 30 cm	10	15641104
	P1-200200-10	20 x 20 cm	10	15641139
	P1-200300-10	20 x 30 cm	10	15641163
Curea P1 SuperCore Wondverband Drain				
Steriel	P1-100100D-25	12 x 12 cm	25	15741346
Curea P1 SuperCore Wondverband Border				
Steriel	P1B-160160-10	16 x 16 cm	10	15943178
	P1B-150250-10	15 x 25 cm	10	15943151
Curea P2 SuperCore Wondverband				
Steriel	P2-110110-10	11 x 11 cm	10	15773132
	P2-100200-10	10 x 20 cm	10	15773167
	P2-200200-10	20 x 20 cm	10	15773191
	P2-200300-10	20 x 30 cm	10	15773221



Superabsorberend wondverband

met actieve koolstoflaag

Specifiek inzetbaar bij zeer geurende wonden zoals oncologische wonden of sterk geïnfecteerde wonden. Zeer hoog absorptievermogen. Beide zijden van het verband zijn aan te brengen.

	REF nr	afmeting	stuks per verpakking	Z-Index
Curea P1 SuperCore Wondverband DUO Active				
Steriel	C1DUO-100100	10 x 10 cm	10	16341465
	C1DUO-100200	10 x 20 cm	10	16341511
	C1DUO-200200-10	20 x 20 cm	10	16851374
	C1DUO-200300-10	20 x 30 cm	10	16851366



Alginaat

Gemaakt van calciumalginaat vezels en carboxymethylcellulose (CMC). Heeft een hoge absorptiecapaciteit. De alginaat-CMC-vezels reageren op wondvocht met een gelering wat een ideaal milieu geeft voor vochtige wondgenezing.

	REF nr	afmeting	stuks per verpakking	Z-Index
Decifera Alginate Dressing				
Steriel	SW0001	5 x 5 cm	5	16397894
	SW0003	10 x 10 cm	5	16397908
	SW0013	2 x 30 cm	5	16397916



Zilveralginaat

Het bestaat uit alginaat, carboxymethylcellulose (CMC) met zilver gecoatete nylon-vezels. Dankzij de niet-klevende wondcontactlaag wordt het risico op verklefing met het wondbed en het loslaten van vezels tot een minimum beperkt.

Geïndiceerd voor de behandeling van bacteriële besmetting en infecties in matig tot sterk exsuderende wonden van de huid en het onderliggende weefsel.

	REF nr	afmeting	stuks per verpakking	Z-Index
Silvercel Non Adherent				
Steriel	CAD7050	5 x 5 cm	10	16181662
	CAD7011	11 x 11 cm	10	16181670
	CAD7020	10 x 20 cm	5	16181689
	CAD7230	2,5 x 30,5 cm	5	16181697



Hydrofiber

Een zacht, vervormbaar non-woven wondverband met een erg groot absorptievermogen. Het is gemaakt van natriumcarboxymethylcellulose en versterkende cellulosevezels.

	REF nr	afmeting	stuks per verpakking	Z-Index
Kerracel Gelling Fiber Dressing				
Steriel	CWL1032	5 x 5 cm	10	16990013
	CWL1166	10 x 10 cm	10	16990056

Fixatiematerialen



Elastisch fixatiewindsel

Fixatiewindsel (circa. 100%). Bestaande uit 40% viscose en 60% polyamide. Olie-, vet- en zweetbestendig.

	REF nr	afmeting	stuks per verpakking	Z-Index
Heka Last				
Steriel	WI0060	4 m x 4 cm	1	15456544
	WI0062	4 m x 6 cm	1	15456552
	WI0064	4 m x 8 cm	1	15456579
	WI0066	4 m x 10 cm	1	15456587
	WI0068	4 m x 12 cm	1	15456609



Cohesief elastisch fixatiewindsel

Bestaande uit 36% katoen, 36% viscose en 28% polyamide. Kleeft aan zichzelf en niet aan huid en haar. De elasticiteit en kleefkracht voorkomt dat het verband gaat schuiven. Latexvrij.

	REF nr	afmeting	stuks per verpakking	Z-Index
Heka Haft				
Steriel	WI0614-1	4 m x 4 cm	5	17149614
	WI0615-1	4 m x 6 cm	5	17149622
	WI0616-1	4 m x 8 cm	5	17149630
	WI0617-1	4 m x 10 cm	5	17149649
	WI0618-1	4 m x 12 cm	5	17149657
	WI0625-1	20 m x 6 cm	1	17149665
	WI0626-1	20 m x 8 cm	1	17149673
	WI0627-1	20 m x 10 cm	1	17149681



Transparante wondfolie

Te gebruiken ter fixatie van bijvoorbeeld wondverband of infusiematerialen. De wondfolie is transparant waardoor het wondgebied goed te beoordelen is.

	REF nr	afmeting	stuks per verpakking	Z-Index
Heka Film				
Steriel	PL0140	6 x 7 cm	10	16397592
	PL0142	10 x 12 cm	5	16397924
Niet steriel	PL0371	10 m x 10 cm	1	16397940



Eilandpleister

Elastisch, zelfklevend steriel wondverband. Non-woven en rekbare ruglaag. De pleister heeft een sterke, hypoallergene kleeflaag en is ook eenvoudig te verwijderen. Ook verkrijgbaar in waterproof variant.

	REF nr	afmeting	stuks per verpakking	Z-Index
Heka Plast				
Steriel	PL0160	5 x 7 cm	50	15392627
	PL0162	6 x 10 cm	50	15392635
	PL0164	10 x 15 cm	25	15392651
	PL0166	10 x 20 cm	25	15392678
	PL0168	10 x 25 cm	25	15392694
	PL0170	10 x 30 cm	25	15392708



Siliconen hechtpleister

Speciale fixatietape gemaakt van siliconen gecombineerd met een high permeabele PU-film. Zeer huidvriendelijk, zorgt voor pijnloze verwijderingen zonder de huid te beschadigen.

	REF nr	afmeting	stuks per verpakking	Z-Index
Heka Plast Silicone Tape				
	PL0040	1,5 m x 2,5 cm	12	16341554



Non-woven hechtpleister

Zeer huidvriendelijke hechtpleister met microporeuze non-woven ruglaag. Zuurstof- en waterdamp doorlatend.

	REF nr	afmeting	stuks per verpakking	Z-Index
Heka Por Dispenser				
	PL0035	5 m x 2,5 cm	1	15392538
Heka Por Ring				
	PL0081	5 m x 1,25 cm	1	15605825
	PL0082	5 m x 2,5 cm	1	15482235
	PL0033	5 m x 5 cm	1	15482243
	PL0027	9,1 m x 2,5 cm	12	15392546



Kunstzijde hechtpleister

Krachtige hechtpleister gemaakt van kunstzijde. goed bestand tegen tractie.

REF nr	afmeting	stuks per verpakking	Z-Index
Heka Silk Dispenser			
PL0072	5 m x 2,5 cm	1	15392562
Heka Silk Ring			
PL0073	5 m x 1,25 cm	1	15605787
PL0074	5 m x 2,5 cm	1	15605809



Heka Fix Comfort

Geconfectioneerd buisverband, kant- en klare oplossing voor het fixeren van wondverband op het bovenlichaam.

REF nr	maat	stuks per verpakking	Z-Index	
Heka Fix Comfort				
Niet steriel	FX0020	korte mouw S 36-38	1	15490327
	FX0021	korte mouw M 40-42	1	15490319
	FX0022	korte mouw L 44-46	1	15490300
	FX0023	korte mouw XL 48-50	1	15490335

VAN HEEK MEDICAL

Onderdeel van Mosadex Groep

Macroweg 10 | 5804 CL Venray | Nederland
Rubensstraat 104 | 2300 Turnhout | België

T +31 88 220 88 22 | **E** info@vanheek.com | **www.vanheek.com**